

## IMPORTANT

### Interférence de la sulfasalazine sur le dosage d'ALAT

---

Docteur, Madame, Monsieur,

Notre fournisseur Siemens nous informe que la sulfasalazine **peut interférer avec le dosage d'ALAT** entraînant des résultats faussement bas.

La surveillance du traitement par Sulfasalazine nécessitant une exploration de la fonction hépatique, il est impératif de préciser l'utilisation de ce médicament utilisé dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la rectocolite hémorragique, de la maladie de Crohn, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite inflammatoire et de l'uvéite.

<p>C'est pour cela que les échantillons des patients sous traitement par sulfasalazine doivent être prélevés à distance de la dernière prise (minimum de 12 h) si un bilan hépatique est prescrit.</p>
--

Merci d'indiquer sur votre ordonnance la prise de ce médicament lors d'une demande de dosage d'ALAT.

Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires (Dr Sophie Laurent, 02 35 91 02 29 ou [sophie.laurent@sfmtbio.eu](mailto:sophie.laurent@sfmtbio.eu))